

NÁVOD NA POUŽITIE

Cutimed® DebriClean SK

Popis produktu

Cutimed® DebriClean na strane určenej na prikladanie na rany pozostáva z bielych monovláknových slučiek z mikrovlákna, ktoré účinne čistia ranu a chránia neporušené tkanivo. Modré, abrazívne slučky z mikrovlákna zabezpečujú účinné čistenie rán a odstraňujú aj miernu nekrózu.

Monovláknové slučky z mikrovlákna:

- bezpečne a efektívne odstraňujú biofilm
- viažu a zadržiavajú baktérie
- absorbujú exsudát z rany, časti odlúpenej a suchej pokožky
- ľahko a bezpečne sa používajú s viditeľnými výsledkami už po niekoľkých minútach

Indikácie

Cutimed® DebriClean pomáha pri čistení povrchových rán a okolitej pokožky, napríklad pri:

- diabetických vredoch
- žilových a arteriálnych vredoch
- dekubitoch
- pooperačných ranách a hojení rán sekundárnym úmyslom
- povrchových popáleninách
- absorpcii exsudátu, častí odlúpenej a suchej pokožky

Kontraindikácie

Nie sú známe žiadne kontraindikácie.

Upozornenia a opatrenia

- Nedotýkajte sa vankúšika na strane určenej na prikladanie na rany – vankúšik držte pomocou pásika na zadnej strane.
- Nestrihajte Cutimed® DebriClean.
- Zaistite, aby neuplynul čas použiteľnosti a aby sterilný obal nebol poškodený alebo neúmyselne otvorený. V takom prípade sa vankúšik už nesmie použiť.
- Modré vlákna na strane vankúšika určenej na prikladanie na rany používajte iba na odlupujúcu sa pokožku a miernu nekrózu. Nepoužívajte na granulujúce tkanivá.
- Pri použití silnejšieho tlaku alebo rýchleho trenia je potrebná opatrnosť, aby pacientovi nebola spôsobená nadmerná bolesť.
- Nenechávajte Cutimed® DebriClean na rane – vhodný je len na čistenie rán.
- Na každú ranu použite nový vankúšik – len na jednorazové použitie, aby ste zabránili šíreniu baktérií. (D)
- Nepoužívajte, ak je obal už otvorený alebo poškodený, pretože sterilita pomôcky je zabezpečená iba vtedy, ak je obal pred použitím neotvorený a nepoškodený.

Návod na použitie

1. V prípade potreby odstráňte krytie z rany

2. Pripravte nasledovné:

- ochranný kryt na jednorazové použitie
- rukavice na jednorazové použitie, v prípade potreby viac ako jeden pár
- dezinfekciu rúk
- roztok na čistenie rán
- Cutimed® DebriClean

3. Vyčistenie rany:

- Navlhčite Cutimed® DebriClean priamo v balení s roztokom na čistenie rán (v súlade s miestnymi odporúčaniami). Vhodné sú všetky súčasné roztoky na čistenie rán (vrátane antiseptík)*. Uistite sa, že je vankúšik úplne nasýtený (odporúčané množstvo: približne 30 ml.) (A)
- Ak je vankúšik nedostatočne navlhčený, pacient môže cítiť bolesť.
- Na držanie Cutimed® DebriClean použite pásik na zadnej strane vankúšika. (B)
- Na čistenie rany použite navlhčenú stranu vankúšika určenú na prikladanie na rany a použite krúživé pohyby s vyvinutím mierneho tlaku. (C)
- Na odstránenie miernej nekrózy použite abrazívnu modrú časť Cutimed® DebriClean na strane určenej na prikladanie na rany.

- Použite inú časť vankúšika ihneď ako sa na monovláknové slučky z mikrovlákna nazbiera dostatočné množstvo odpadu, alebo použite nový Cutimed® Debriclean.
- Použitý Cutimed® Debriclean zlikvidujte ako bežný domový alebo zdravotnícky odpad.
- Po vyčistení rany pokračujte v štandardnej výmene obväzu.
- Liečba rany produktom Cutimed® gél pred výmenou obväzu je prospešná pri čistení nekrotických rán.
- Cutimed® Debriclean môžu používať iba zdravotnícki pracovníci.


* súčasné čistiace roztoky na rany na báze PHMB, chlórnanu sodného alebo chlórnych kyselín, oktenidínu, 0,9 % roztoku chloridu sodného, vody a Ringerovho roztoku.

Uchovávanie a likvidácia

Uchovávajte v suchu, chráňte pred slnečným žiarením a pred vysokou vlhkosťou vzduchu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Likvidácia sa musí vykonať v súlade s národnými požiadavkami.

Upozornenie

Akákoľvek závažná udalosť, ktorá sa vyskytne v súvislosti s používaním tejto pomôcky, má byť nahlásená spoločnosti BSN medical GmbH a príslušnému štátnemu orgánu.

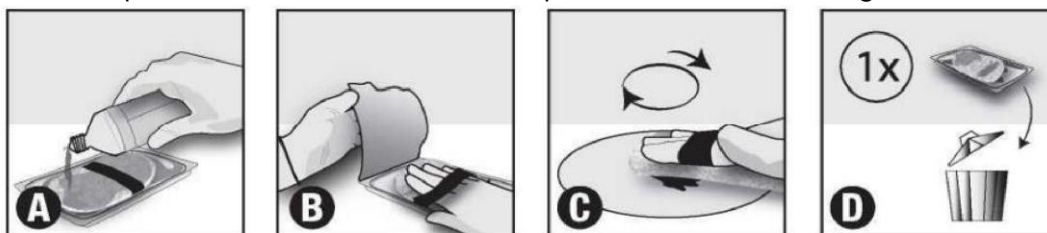

STERILNÉ | EO |

Sterilizované s použitím etylénoxidu



Nepoužívajte, ak je obal poškodený.



Zdravotnícka pomôcka



Nesterilizujte opakovane



Nepoužívajte opakovane



Chráňte pred slnečným žiarením



Udržujte suché



Pozor

LATEX FREE FORMULA

Nie je vyrobené z prírodného latexu



Úroveň výpotku: Suchý až nízky



Úroveň výpotku: Nízky až stredný



Úroveň výpotku: Stredný až vysoký



Úroveň výpotku: vysoký až nadmerný



Hĺbka rany: povrchná



Fáza rany: infikovaná



Fáza rany: chrastavá



Fáza rany: granulovaná



Fáza rany: epitelizácia



Fáza rany: nekrotická

® = registrovaná ochranná známka

Vyrobené v Írsku

essity



Vyrobené pre:
BSN medical GmbH
Schützenstraße 1-3
22761 Hamburg
Nemecko